






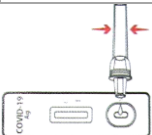


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ SELF TEST

1. Βάζουμε στο τραπέζι χαρτί κουζίνας.	
2. Φυσάμε καλά τη μύτη μας.	
3. Πλένουμε και αποστειρώνουμε τα χέρια μας.	
4. Ανοίγουμε τη λευκή συσκευασία, βγάζουμε τη συσκευή εξέτασης και την αφήνουμε στο χαρτί κουζίνας.	
5. Βάζουμε στο χαρτί κουζίνας τη συσκευασία και, χωρίς να βγάλουμε τη μπατονέτα από μέσα, βγάζουμε το προστατευτικό φύλλο (συνήθως ανοίγει σαν τα φακελάκια των χανσαπλάστ).	
6. Βγάζουμε το καπάκι από το δοχείο μίξης και αφήνουμε και τα δύο στο χαρτί κουζίνας.	
7. Στρίβουμε το πάνω μέρος του δοχείου με το υγρό μέχρι που να κοπεί και να ανοίξει.	
8. Αδειάζουμε ΟΛΟ το υγρό στο δοχείο μίξης .	
9. Κρατάμε το δοχείο με το υγρό <u>στο δευτερεύον χέρι μας</u> ενώ με το βασικό παίρνουμε τη μπατονέτα πιάνοντάς την από το σημείο που ΔΕΝ έχει βαμβάκι.	
10. Χωρίς να γείρουμε πίσω το κεφάλι, βάζουμε ΑΡΓΑ την πλευρά με το βαμβάκι της μπατονέτας στο ρουθούνι μας μέχρι να συναντήσουμε αντίσταση δίχως να αισθανόμαστε δυσφορία. Στρίβουμε τη μπατονέτα 5 φορές.	
11. Τη βγάζουμε από το ρουθούνι και επαναλαμβάνουμε στο άλλο.	
12. Τη βγάζουμε από το δεύτερο ρουθούνι και τη βάζουμε από την πλευρά με το βαμβάκι στο δοχείο μίξης όπου έχουμε αδειάσει το υγρό.	
13. Στρίβουμε τη μπατονέτα μέσα στο υγρό, πιέζοντάς τη στον πάτο και τα τοιχώματα του δοχείου τουλάχιστον για 60 δευτερόλεπτα. Καθώς τη βγάζουμε, πιέζουμε τα τοιχώματα του δοχείου ώστε να στραγγίσει το υγρό από το βαμβάκι.	
14. Αφήνουμε τη μπατονέτα στη συσκευασία της και ξαναβάζουμε το καπάκι στο δοχείο μίξης.	
15. Στάζουμε τις προβλεπόμενες σταγόνες από το δοχείο μίξης στη στρόγγυλη υποδοχή της συσκευής εξέτασης που σημαδεύεται με το γράμμα S	
16. Παρατηρούμε το αποτέλεσμα στα προβλεπόμενα λεπτά . Αν περιμένουμε λιγότερο ή περισσότερο , μπορεί να εμφανιστεί άλλο, λανθασμένο αποτέλεσμα .	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΤΑΓΟΝΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
BioMaxima	2	10 λεπτά
VivaDiag	2-3	15 λεπτά
JoysBio	3	Μεταξύ 15 και 20 λεπτών

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ



C=Control

T=Test

S=Sample

Το τεστ είναι **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** όταν υπάρχει γραμμή **ΜΟΝΟ** στο C
 Το τεστ είναι **ΘΕΤΙΚΟ** όταν υπάρχουν γραμμές **ΚΑΙ** στο C **ΚΑΙ** στο T
 Το τεστ είναι **ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ** όταν **ΔΕΝ** υπάρχει γραμμή στο C