



- ✓ Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι **Θετικό**, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα Θετικού αποτελέσματος η οποία και εκτυπώνεται. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να μεταβούν με το παιδί, μέσα σε 24ώρες, σε μια δημόσια δομή, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.
- ✓ Μέχρι να γίνει αυτό όλη η οικογένεια παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
- ✓ Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι Θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..
- ✓ Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή και το παιδί επιστρέφει στο σχολείο έχοντας μαζί του αυτή τη βεβαίωση.
- ✓ Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή με δική τους επιβάρυνση.
- ✓ Χωρίς την κάρτα **ΔΕΝ** μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει τα μαθήματα και θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του.



## Οδηγίες για τα self test

Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός θα μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν 2 test ανά εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη)

Τα κρούσματα θα πρέπει που θα προκύπτουν θα πρέπει να δηλώνονται στο [self-testing.gov.gr](https://self-testing.gov.gr)


1 Διαβάστε τις οδηγίες καλά. Καθαρίστε την επιφάνεια που θα ανοίξετε το test.



2 Πλύντε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό.



3 Ανοίξτε την ειδική συσκευασία, με το υγρό, αδειάστε το υγρό στο ειδικό δοχείο, βγάλτε τον στυλεό, μην αγγίξετε την μαλακή περιοχή του στυλεού με τα χέρια σας, ούτε να την ακουμπήσετε πουθενά.

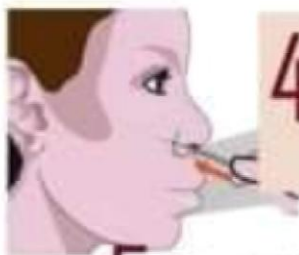

4 Εισχωρίστε την μαλακή πλευρά μέσα στο ρουθούνι σας, και περιστρέψτε αργά, επαναλάβετε και στο άλλο ρουθούνι, με τον ίδιο τρόπο.


5 Στη συνέχεια, βάλτε τον στυλεό μέσα στο σωληνάριο με το υγρό.



6 Αφαιρέστε τον, κλείστε το καπάκι του σωληναρίου και με το σταγονόμετρο ρίχτε 3-4 σταγόνες στην κοιλότητα της πλακέτας



7 Περιμένετε 15" λεπτά  
Αν υπάρχει μια γραμμή στην ένδειξη C το test είναι αρνητικό

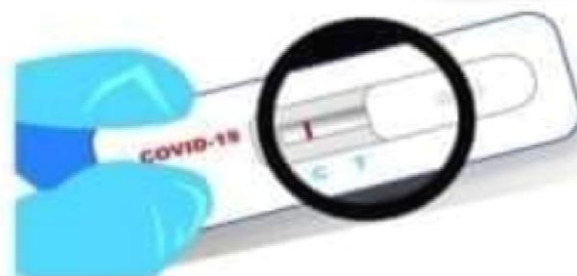

8 Βάλτε το χρησιμοποιημένο test στην ειδική σακούλα που βρίσκεται μέσα στην συσκευασία, ακολουθείστε την διαδικασία απόρριψης όπως αυτή περιγράφεται στο κουτί.